



CHEMOEXFOLIATION
ENERPEEL®



EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG

CHEMOEXFOLIATION MIT ENERPEEL® MEDIZINPRODUKTEN

INFORMATIONSLATT

1. VORWORT

Die ENERPEEL® Medizinprodukte entsprechen der europäischen Direktive 93/42CEE für Medizinprodukte.

2. DEFINITION

ENERPEEL® Medizinprodukte bestehen, entsprechend unterschiedlicher therapeutischer Bedürfnisse, aus verschiedenen Säuren oder Säuremischungen unterschiedlicher Konzentrationen.

3. ZIEL DER ANWENDUNG VON ENERPEEL® MEDIZINPRODUKTEN

Chemoexfoliation (chemisches Peeling) ist eine medizinische Anwendung, die durch eine kontrollierte Verletzung der Haut mittels organischer Säuren die Regeneration der Epidermis und die dermale Regenerierung fördert. Abgestorbene Zellen der Hornschicht werden entfernt, spezifische Hautkonditionen werden verbessert.

Exfoliationen können als sehr superfiziell, superfiziell, mitteltief oder tief klassifiziert werden, in Abhängigkeit vom verwendeten Exfoliativ und der Applikationszeit bis zur Neutralisation.

* WICHTIGE HINWEISE

- Falls sich „Frosting“ bildet, was von den aufgetragenen Schichten, den Kontaktzeiten, der Anzahl der vorherigen Sitzungen, dem zeitlichen Abstand zwischen einer Sitzung und der nächsten, den genetisch-ethnischen Eigenschaften, dem Fototyp und dem Hauttyp abhängig ist, sofort neutralisieren oder die Peelinglösung entfernen. Dazu die hierfür vorgesehenen ENERPEEL® NEU Neutralizer oder ENERPEEL® RW Remover Wipes Tücher verwenden.
- Die Ampulle wird mit Einweg-Applikatoren verwendet, die für eine/n einzige/n Patienten/in und eine einzige Anwendung bestimmt sind. Die Packung enthält 8/32 Einweg-Applikatoren, die für die Durchführung von ebenso vielen Sitzungen erforderlich sind.
- Entsprechend der unterschiedlichen Indikationen können mit ENERPEEL® Medizinprodukten in Abhängigkeit von der verwendeten Säure, der Applikationszeit, den Auftragsschichten, den Patientencharakteristika und der zu behandelnden Pathologie Chemoexfoliationen von sehr superfiziell bis mitteltief durchgeführt werden.
- ENERPEEL® Medizinprodukte nur bis zu dem aufgedruckten Haltbarkeitsdatum anwenden.

4. GEBRAUCHSANWEISUNG

Die Chemoexfoliation entfernt epidermale Zellen und fördert so die Erneuerung der Haut. Sie besitzt daher eine spezifische Aktion zur Vorbeugung, Kontrolle, Behandlung oder Verzögerung ganz unterschiedlicher Pathologien der Haut. Die ENERPEEL® Medizinprodukte werden mit dem Ziel auf die Haut aufgetragen unterschiedlichen Hautproblemen vorzubeugen, sie zu kontrollieren, zu behandeln oder aufzuhalten, wie zum Beispiel: hypertrophe Narben, Hyperpigmentierungen, Hautelastosen, Akne inflammatoria, Akne comedonica, Aknenarben oder aktinische Schäden wie Keratosen oder potentielle Präkanzerosen.

4.1.1. Aktinische Hautschädigungen

- Aktinische Keratose
- Sonnenbedingte Elastose
- Sonnenlentiginos
- Dermatoheliosis
- Pigmentalterationen

4.1.2. Hyperpigmentierungen

- Melasma
- Entzündungsbedingte Hyperpigmentierung

4.1.3. Akne und andere dermatologische Indikationen

- Superfizielle Narben
- Strahlungsbedingte Keratose
- Akne vulgaris
- Aknenarben
- Flache Warzen
- Sebumhyperplasie
- Rosacea papulo-pustolösen

4.1.4. Unschöne Hauterscheinungen

- Photo- und Chronoalterung
- Falten
- Verlust der Gleichmäßigkeit der Hautfärbung
- Nachlassen der Straffheit der Haut



EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG

