



CHEMOEXFOLIATION
ENERPEEL®
EL-PLUS
CE

PATIENTEN REGISTRATIEKAART

1. GEGEVENS PATIENT

Naam en Achternaam _____

Adres _____

Telefoon / mobiel nr. _____

Leeftijd _____

Geslacht ☐ F ☐ M

2. UITSLUITINGSCRITERIA - WANNEER DE CHEMISCHE "PEELING" NIET UITGEVOERD MAG WORDEN

- a) Aanwezigheid van herpes simplex in het te behandelen gebied.
- b) In geval van recente operaties (de afgelopen 6 maanden), zoals blepharoplastiek, ooglid lift, etc.
- c) Immunitetsonderdrukkende ziekten.
- d) Eerder uitgevoerde radiotherapie op de te behandelen huid die fysiologisch herstel negatief kan beïnvloeden.
- e) Aanleg voor de ontwikkeling van keloïden e/o hypertrofische littekens.
- f) Aanleg voor de ontwikkeling van post-inflammatoire hyperpigmentatie.
- g) Zwangerschap.
- h) Borstvoeding.
- i) Allergie en/of bekende overgevoeligheid voor één of meerdere bestanddelen.
- j) Andere medische overwegingen.

3. GEBRUIKSAANWIJZING

ENERPEEL® EL-PLUS is een medisch hulpmiddel bedoeld voor de exfoliatie en het weer in model brengen van de huid (chemische "peeling") van de zone rond de ogen (inclusief de oogleden) en de zone rond de lippen (exclusief de lippen zelf).

ENERPEEL® EL-PLUS is geschikt voor de chemische exfoliatie van beschadigde keratinocyten en leidt tot de vorming van nieuwe epidermale cellen. Het draagt zo bij aan de preventie van het ontstaan van aandoeningen die gerelateerd zijn aan blootstelling aan de zon (aktinische schade, aktinische keratose etc.).

WAARSCHUWING*: ENERPEEL® EL-PLUS ALLEEN OP ONBESCHADIGDE HUID AANBRENGEN.

FITZPATRICK FOTOTYPEN CLASSIFICATIE

Het fototype identificeert welke reactie de huid heeft op zonnestraling, en is gebaseerd op bepaalde kenmerken zoals de kleur van haar en ogen, gelaatskleur, aanwezigheid van sproeten en de reactie van het individu op zonlicht.

Er bestaan 6 fototypen die zich onderscheiden volgens de volgende karakteristieken.

FOTOTYPEN	BESCHRIJVING
Fototype I	Patiënten met een zeer bleke huid, vaak met sproeten, blonde of rode haren en blauwe of grijze ogen. Ze ontwikkelen over het algemeen erytheem na elke onbeschermde blootstelling aan de zon. Er is weinig of geen bruining. Er is een extreme reactie op zonnestraling, met een hoog risico op permanente schade.
Fototype II	Patiënten met een bleke huid, donkerblonde of lichtbruine haren. Ze raken snel verbrand door de zon. Ze ontwikkelen een lichte (gouden) gelaatskleur.
Fototype III	Patiënten met een vrij donkere huid en bruin haar. Ze verbranden alleen na langdurige blootstelling aan de zon. Ze ontwikkelen een diepe, gelijkmatige gelaatskleur.
Fototype IV	Patiënten met een olijfkleurige gelaatskleur, donkere ogen en zwart haar. Ze verbranden zelden door de zon. Ze ontwikkelen snel een zeer, chocoladekleurige gelaatskleur.
Fototype V	Patiënten met een zeer donkere gelaatskleur, donkere ogen en zwart haar. Ze verbranden zeer zelden.
Fototype VI	Patiënten met een zwarte gelaatskleur, donkere ogen en zwart haar.

*** Belangrijke waarschuwing:** de fototypen IV, V en VI volgens de Fitzpatrick schaal hebben een verhoogd risico op hyperpigmentatie in het behandelde gebied. De fototypen I, II, III hebben meer kans op het ontwikkelen van erytheem en littekens.

FOTOTYPE VAN DE PATIENT

I ☐ II ☐ III ☐ IV ☐ V ☐ VI ☐

4. GLOGAU FOTOVEROUDERING CLASSIFICATIE

De staat van fotoveroudering kan worden omschreven aan de hand van de schaal van Glogau, hieronder in tabel 6 getoond:

SCHAAL	LEEFTIJD	BESCHRIJVING
Licht	van 28 tot 35 jaar	Gekenmerkt door kleine rimpels, zonder keratose.
Matig	van 35 tot 50 jaar	Gekenmerkt door kleine rimpels, vale gelaatskleur met de aanwezigheid van actinische keratose.
Gevorderd	van 50 tot 65 jaar	Gekenmerkt door diepe rimpels, de aanwezigheid van teleangiëctasieën, pigmentstoornissen en actinische keratose.
Hevig	van 50 tot 65 jaar	Gekenmerkt door dynamische en andere rimpels, fotoveroudering en actinische keratose.

FOTOVEROUDERING VAN DE PATIENT

Licht ☐ Matig ☐ Gevorderd ☐ Hevig ☐

5. RASSEN-GENETISCHE CLASSIFICATIE EN MOGELIJKE REACTIES OP CHEMISCHE PEELINGS

De verschillende reacties van de huid van verschillende rassen op een chemische "peeling" kunnen worden onderverdeeld in 6 categorieën, waarbij de gelaatskleur wordt gecorreleerd aan de somatische karakteristieken. De categorieën zijn gebaseerd op de geografische ligging van oorsprong.

RASSEN CATEGORIE	GEOGRAFISCHE OORSPRONG	KENMERKEN HUD EN GELAATSTREKKEN	COMPLICATIES BIJWERKINGEN	KANDIDAAT VOOR PEELING
(A) Noorderlingen (Zweden, Ieren, enz.)	Noord-Europa	Lichte tot zeer lichte huidskleur. Fijne huid en gelaatstrekkings.	Erytheem +++ Teleangiectasie Littekens	Zeer goed
(B) Europeanen (Engelsen, Italianen, Duitsers, Fransen, enz.)	Centraal- Europa Zuid- Europa	Medium huidskleur. Groffe huid en gelaatstrekkings.	Weinig	Uitstekend
(C) Mediterranen (Spanjaarden, Grieken, enz.)	Noord-Afrika en West-Azië	Donkere huid en groffere gelaatstrekkings dan de Europeanen.	Hyperpigmentatie van + tot ++ Erytheem +	Zeer goed
(D) Indo-pakistanen (Pakistanen, Thailanden, enz.)	Centraal-Noord-Afrika Zuidoost-Azië	Dikke en vette huid, donkerder en groffer dan de Mediterraneanen.	Hyperpigmentatie +++ Hypopigmentatie +	Aanvaardbaar
(E) Afrikanen (zwarte Amerikanen, Sudanese, Nigerianen, enz.)	Centraal Zuid-Afrika	Zwarte tot zeer zwarte huidskleur. Groffe tot zeer groffe huid en gelaatstrekkings.	Hypopigmentatie + Hyperpigmentatie ++	Aanvaardbaar
(F) Aziaten (Japanners, Koreanen, enz.)	Oost-Azië	De classificatie van huidskleur varieert van licht tot medium donker. Grof tot zeer groffe huid en gelaatstrekkings.	Hyperpigmentatie +++ Erytheem +++ dat zich kan omzetten in hyperpigmentatie	Goed

WAARSCHUWING:* de correlatie tussen de schaal van Fitzpatrick en de genetisch-rationale classificatie kan nuttig zijn om de reactie van de huid op de chemische peeling te voorzien, zowel voor de inschatting van de effectiviteit als voor eventuele bijwerkingen.

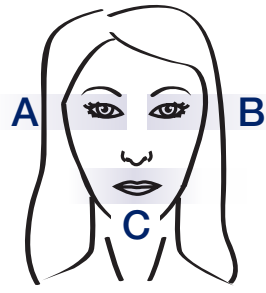
RASSEN-GENETISCHE CLASSIFICATIE VAN DE PATIENT

(A) ☐ (B) ☐ (C) ☐ (D) ☐ (E) ☐ (F) ☐



6. HET DEFINIËREN VAN DE TE BEHANDELEN ZONE

De applicatiezones rond de ogen en lippen zijn willekeurig onderverdeeld in de volgende huideenheden

HUIDEENHEID	BESCHRIJVING	
A	Zone rondom het rechteroog van de patiënt	
B	Zone rondom het linkeroog van de patiënt	
C	Zone rondom de lippen	

TE BEHANDELEN HUIDEENHEID/-HEDEN

A ☐ B ☐ C ☐

7. TIJDSINDICATIE GEPLANE BEHANDELINGSCYCLUS

Aantal behandelingen _____

Tijdsinterval tussen elkaar opeenvolgende behandelingen _____

Geplande duur voor de gehele behandelingscyclus _____

8. HET GEPLANEDE AANTAL UIT TE VOEREN SESSIES

BEHANDELDE HUID ZONE	APPLICATIETIJDEN EN BATCHNUMMER VAN HET GEBRUIKTE PRODUCT VOORAFGAAND AAN DE NEUTRALISATIE BEHANDELINGEN											
	1° Sessie											
A	1e behandeling			2e behandeling			3e behandeling			4e behandeling		
	dd / mm / jiji			dd / mm / jiji			dd / mm / jiji			dd / mm / jiji		
	Batchnummer: _____			Batchnummer: _____			Batchnummer: _____			Batchnummer: _____		
	☐ 1ste laag	☐ ~1-2 min.	☐ Anders: _____	☐ 1ste laag	☐ ~1-2 min.	☐ Anders: _____	☐ 1ste laag	☐ ~1-2 min.	☐ Anders: _____	☐ 1ste laag	☐ ~1-2 min.	☐ Anders: _____
	☐ 2de laag	☐ ~1-2 min.	☐ Anders: _____	☐ 2de laag	☐ ~1-2 min.	☐ Anders: _____	☐ 2de laag	☐ ~1-2 min.	☐ Anders: _____	☐ 2de laag	☐ ~1-2 min.	☐ Anders: _____
B	1e behandeling			2e behandeling			3e behandeling			4e behandeling		
	dd / mm / jiji			dd / mm / jiji			dd / mm / jiji			dd / mm / jiji		
	Batchnummer: _____			Batchnummer: _____			Batchnummer: _____			Batchnummer: _____		
	☐ 1ste laag	☐ ~1-2 min.	☐ Anders: _____	☐ 1ste laag	☐ ~1-2 min.	☐ Anders: _____	☐ 1ste laag	☐ ~1-2 min.	☐ Anders: _____	☐ 1ste laag	☐ ~1-2 min.	☐ Anders: _____
	☐ 2de laag	☐ ~1-2 min.	☐ Anders: _____	☐ 2de laag	☐ ~1-2 min.	☐ Anders: _____	☐ 2de laag	☐ ~1-2 min.	☐ Anders: _____	☐ 2de laag	☐ ~1-2 min.	☐ Anders: _____
C	1e behandeling			2e behandeling			3e behandeling			4e behandeling		
	dd / mm / jiji			dd / mm / jiji			dd / mm / jiji			dd / mm / jiji		
	Batchnummer: _____			Batchnummer: _____			Batchnummer: _____			Batchnummer: _____		
	☐ 1ste laag	☐ ~1-2 min.	☐ Anders: _____	☐ 1ste laag	☐ ~1-2 min.	☐ Anders: _____	☐ 1ste laag	☐ ~1-2 min.	☐ Anders: _____	☐ 1ste laag	☐ ~1-2 min.	☐ Anders: _____
	☐ 2de laag	☐ ~1-2 min.	☐ Anders: _____	☐ 2de laag	☐ ~1-2 min.	☐ Anders: _____	☐ 2de laag	☐ ~1-2 min.	☐ Anders: _____	☐ 2de laag	☐ ~1-2 min.	☐ Anders: _____

